

Aktive Gebärbecken

Katalog



Bestellte Wassergeburtspools für Krankenhäuser
vom führenden Lieferanten der Welt voraus

Garantiert für 20 Jahre

Wenn Sie nach einem Wassergebärbecken für Ihre Entbindungsstation suchen, können wir Ihnen unsere einzigartige Expertise anbieten.

Wir haben wesentlich dazu beigetragen, den Weg für den Einsatz von Wasser bei Wehen und Entbindungen zu bahnen. Es war der Entwurf unserer Wassergebärbecken, der diese Revolution in der Geburtshilfe möglich gemacht hat.

Wir liefern seit 1987 Gebärbecken an Hunderte Krankenhäuser in aller Welt und arbeiten eng mit unseren Kunden und mit technischen Experten zusammen, um unsere Produkte weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Dadurch verfügen wir über eine einzigartige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Gebärbecken, die sich durch außergewöhnlichen Nutzwert und unübertroffene Qualität auszeichnen.

Seit langem setzen unsere Produkte den Maßstab für die gesamte Branche. Unsere neue Produktpalette an Gebärbecken stellt nun in jeder Hinsicht einen weiteren Quantensprung dar.

Wir verbinden unsere reiche Erfahrung in den Herstellungsmethoden mit der Verwendung bester Materialien und bieten Ihnen dadurch Gebärbecken von unverwechselbarer Qualität. Unsere Produkte sind mit einer zwanzigjährigen Garantie versehen - auch darin sind sie außergewöhnlich.

Wir haben uns bei der Weiterentwicklung der Produkte an ergonomischen Prinzipien orientiert und die konkreten Erfahrungen einbezogen, die Mütter und Hebammen mit den Gebärbecken gemacht haben.

Sie bieten Müttern ausreichend Raum, um verschiedene Positionen auszuprobieren und diejenige zu finden, die für den Gebärvorgang am vorteilhaftesten ist.

Hebammen können sich entspannt um die Mütter kümmern und sich darauf verlassen, dass bei der Gestaltung des Beckens jede erdenkliche geburtshilfliche Maßnahme berücksichtigt worden ist.

Jedes Becken wird als nahtloses, solides Stück aus einem Guss handgefertigt und besteht aus Ficore® Verbundstruktur, einem patentierten Material von außergewöhnlicher Stabilität und Festigkeit, das sich angenehm, glatt und warm anfühlt.

Mütter können über ein mehrfarbiges LED-Lichtsystem per Fernbedienung das Ambiente im Zimmer bestimmen und auf dem eingebauten Soundsystem mit Bluetooth-Empfänger ihre Lieblingsmusik abspielen.

Jedes Detail des Designs, der Technik und der Fertigung ist mit dem Ziel gestaltet worden, Gebärbecken von außergewöhnlicher Qualität und höchster Wertbeständigkeit zu schaffen.

Das Aktive Gebärbecken

Das neue Aktive Gebärbecken bietet Hebammen und Müttern eine unvergleichliche Kombination aus zeitgemäßem, ergonomischen Design, erstklassigen patentierten Materialien und maßgeschneiderten Fertigungstechniken. Damit steht das Becken an der Spitze der technischen Entwicklung in diesem Bereich.



Das organische Design hält verschiedenste Funktionen bereit, die der Mutter höchsten physischen und psychischen Komfort bieten. Sie können ihr helfen sich zu entspannen, mit dem Schmerz umzugehen, die Wehen durchzustehen und eine natürliche Geburt zu erleben.

Unsere Erfahrungen mit den Wünschen der Hebammen und unsere Studien über die ergonomischen Erfordernisse bei der Arbeit mit Gebärbecken haben es uns ermöglicht, ein Produkt zu entwickeln, das überragend funktional, komfortabel und gleichzeitig sicher zu benutzen ist.

Das Becken ist so konstruiert, dass die Hebamme die Mutter stets von allen Seiten erreichen und unterstützen kann, wenn sie sich von einer Position zur anderen bewegt

Der hohe Isolationsgrad ermöglicht, dass das Aktive Gebärbecken die Wassertemperatur bis zu sechs Mal länger hält als übliche Gebärwannen.

Die weich geschwungenen Konturen verbinden sich mit einer geschmeidigen Oberfläche und machen das Becken so nicht nur extrem komfortabel für die Mütter und die Hebammen, sondern bewirken auch, dass es sich warm und sinnlich anfühlt.

Der spezielle Sitz zur Unterstützung der Wehen ist so konstruiert, dass die Mutter veranlasst wird, sich nach vorne zu lehnen. Ihr Beckengelenk kann sich dadurch leichter öffnen und ausdehnen, so dass das Kind sich in der Beckenschale leichter drehen kann und besser durch den Geburtskanal passt.

Ein einzigartiges Merkmal des Aktiven Gebärbeckens ist sein spezifischer Sicherheitssitz. Darauf können sich die Mütter entspannt ausruhen, während sie gleichzeitig von der aufrechten Haltung profitieren und vom Auftrieb des Wassers unterstützt werden.

Die Größe und Tiefe sowie die besonderen Funktionen des Aktiven Geburtsbeckens ermutigen die Mutter dazu, sich frei zu bewegen und verschiedene aufrechte Haltungen auszuprobieren. So kann sie diejenige finden, die für sie am angenehmsten ist und dabei hilft den physiologischen Prozess des Gebärens am besten zu entfalten.


Maßgeschneiderte Produktionsverfahren, die Ficore® Verbundstoffe verarbeiten, haben es uns ermöglicht, ein einzigartiges, nahtlos verarbeitetes Becken zu schaffen, das beispiellose Qualität mit überragendem Nutzwert verbindet und von unserer außergewöhnlichen Produktgarantie bis zu 20 Jahre geschützt ist.

Länge: 1840mm Weite: 1650mm Höhe: 750mm

Tiefe: 640mm Gewicht (leer): 90kg

Kapazität: 550 litres

Material: Ficore®

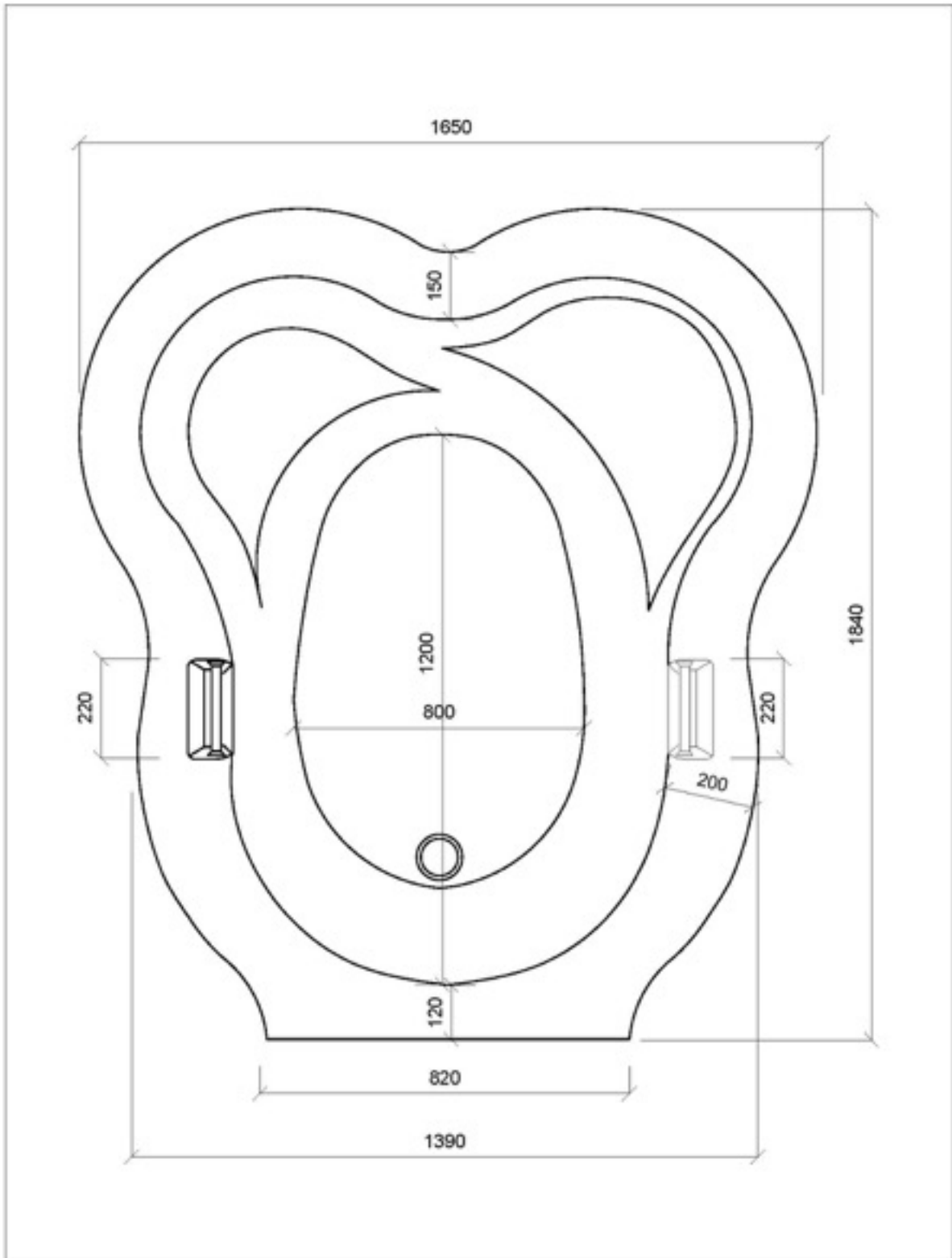

Cad-Plan vorhanden auf Anfrage

Das Gebärbecken "Venus"

Das Design des mittelgroßen [Gebärbeckens "Venus"](#) geht auf eine Tradition zurück, die in den 1980ern entstand und sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützt. Es verwirklicht diese Grundsätze in nahtlosem Design aus Ficore®, allerdings auf neuem Niveau.



Das Wissen um die ergonomische Dynamik der natürlichen Geburt steht von jeher im Mittelpunkt unserer Arbeit und hat uns ermöglicht, Neuerungen im Design einzuführen, die nicht nur das Erlebnis für Mütter und Hebammen wesentlich verbessern, sondern die Geburt auch sicherer machen.

Mütter und Hebammen erleben einzigartigen Komfort und erhalten besondere Unterstützung bei den vielfältigen Umständen, die mit den Wehen und der Geburt verbunden sind.

Zentrale Bestandteile wie der Unterstützungssitz, der extra breite Rand, die eingelassenen Griffe und die eingebuchtete Fußleiste verbinden sich zu einem hochgradig zweckmäßigen Gebärbecken, das zudem außerordentlich nutzerfreundlich ist.

Indem das Becken dazu beiträgt, dass auch der Partner sich bequem und entspannt fühlt, ermutigt es sie dazu, sich in unmittelbarer Nähe der Mutter aufzuhalten und intime Momente mit ihr zu teilen oder sie in anstrengenden Phasen zu unterstützen .

Ficore® ist ein patentiertes Material, das nur für unsere Aktiven Gebärbecken verwendet wird. Es fühlt sich außergewöhnlich warm und geschmeidig an, ist dabei aber fünfmal robuster als andere Materialien, die gewöhnlich für die Anfertigung von Gebärbecken verwendet werden.

Die besondere abgerundete Kante des Beckens bietet Müttern einen festen und soliden Griff, der das gesamte Becken umschließt

Auf dem Unterstützungssitz kann die Mutter sich aus eigener Kraft aufrecht halten oder sich nach vorne lehnen und die Arme auf dem breiten Rand des Beckens abstützen. Dabei hat sie ausreichend Platz, sich frei zu bewegen und von der Wärme und dem Auftrieb des Wassers zu profitieren.

Die Verwendung des Ficore® Verbundmaterials verringert das Infektionsrisiko und passt die Armaturen perfekt an das nahtlose Design des Beckens an. Darüber hinaus bietet es auch wesentliche Konstruktionsvorteile.


Länge: 1920mm Weite: 1350mm Höhe: 750mm

Tiefe: 640mm Gewicht (leer): 80kg

Kapazität: 500 litres

Material: Ficore®

Cad-Plan vorhanden auf Anfrage

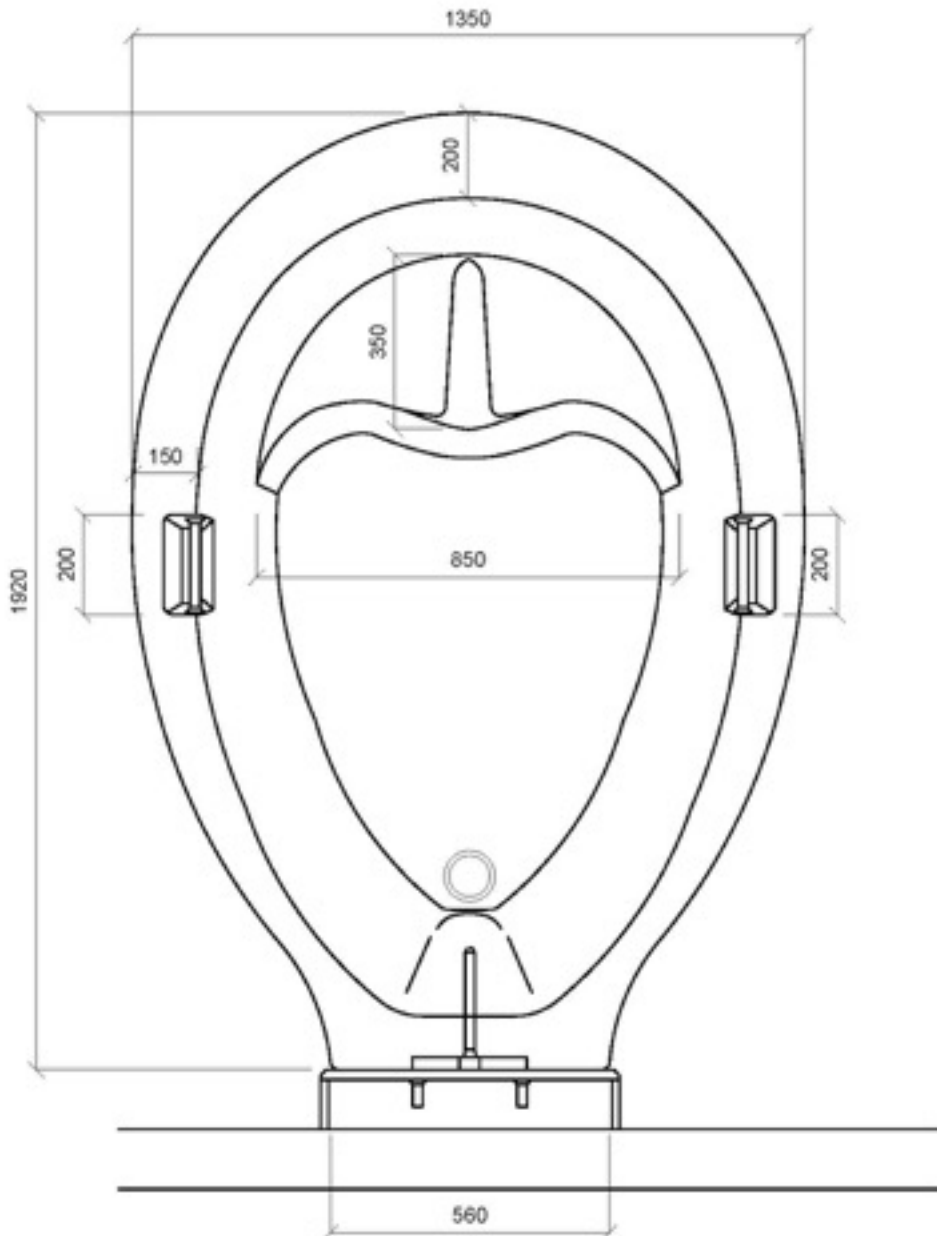

Cad-Plan vorhanden auf Anfrage

Das Gebärbecken "Princess"

Obwohl es für Räume entworfen wurde, in denen Platz knapp ist, kommt das Gebärbecken "Princess" erstaunlich geräumig daher. Es gibt Müttern ausreichend Platz, um unterschiedliche Positionen auszuprobieren und diejenigen zu nutzen, die für sie am komfortabelsten und hilfreichsten sind.



Die innovative Wasserleitung ist ein besonderes Merkmal des Gebärbeckens "Princess" und verhindert, dass die Mutter sich den Kopf am Ausguss stößt. Die Leitung umfasst das gesamte Zu- und Abflusssystem und macht die Wanne in dem gesamten Radius von 360° gleichmäßig benutzbar.

Um den verfügbaren Platz zu optimieren, haben wir den Unterstützungssitz für die Wehen, den unsere anderen Modelle anbieten, durch eine großzügig geschwungene 17-Grad-Steigung ersetzt, die eine speziell geformte Lumbalstütze aufweist und der Mutter dabei hilft, aufrecht zu sitzen.

Im Notfall ermöglicht das Gebärbecken "Princessin" eine sofortige Evakuierung aus dem Becken und kann zudem mit portablem Flaschenzug ausgestattet werden.

Der breite Rand unterstützt die Mutter in einer Vielzahl möglicher Positionen. Er hilft ihr, sicher in das Becken hinein- und wieder herauszusteigen, und kann auch vom Partner oder der Hebamme zum Ausruhen benutzt werden.

Unabhängig davon, welche Position die Mutter im Becken einnimmt, kann die Hebamme sie problemlos erreichen und unterstützen.

Die außergewöhnlich glatte, schimmernde Oberfläche des Gebärbeckens "Princess" fühlt sich warm und angenehm an.


Das Gebärbecken "Princess" ist entwickelt worden, um die Geburtserfahrung der Mütter zu verbessern und die Arbeit der Hebammen sicherer zu machen. Es bietet einen außergewöhnlichen Nutzwert, der zudem von unserer bemerkenswerten Produktgarantie 20 Jahre lang geschützt wird.

Länge: 1600mm Weite: 1100mm Höhe: 750mm

Tiefe: 640mm Gewicht (leer): 70kg

Kapazität: 450 litres

Material: Ficore®

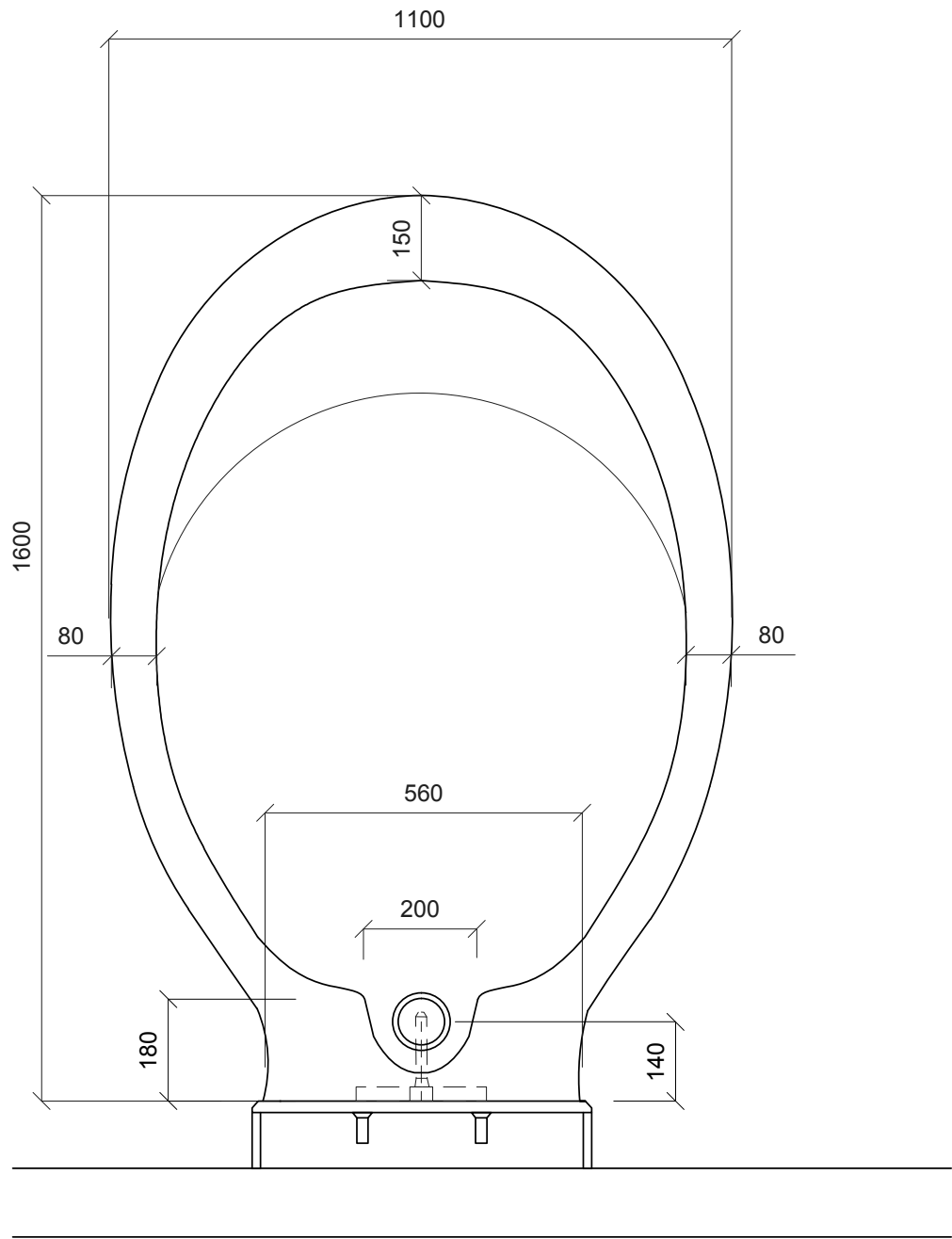

Cad-Plan vorhanden auf Anfrage



Über die Stufe des Trittbretts kann die Mutter das Becken sicher und komfortabel betreten und wieder verlassen.

Sobald die Mutter sich im Wasser befindet, kann auf dem Trittbrett ein Kniepolster angebracht werden, so dass es der Hebamme als Kniestütze dienen kann.

Länge: 455mm Weite: 300mm Höhe: 150mm Gewicht: 3.85kg

Material: Vitrite®

Licht und Ton



Ein mehrfarbiges LED-Licht- und Klangsystem mit Bluetooth-Empfänger, das über eine Fernbedienung kontrolliert werden kann, erlaubt es der Mutter die Atmosphäre im Raum zu gestalten.

Active Birth Pools Ltd

41 Grasmere Road

London N10 2DH

+44 (0) 208 444 1411

www.activebirthpools.com

SL-Medical

Eichenring 24

D-84562 Mettenheim

Phone: +49 (0)8631 - 166262

Fax: +49 (0)3212 - 1369687

info@sl-medical.com

www.sl-medical.com